



atomes

ASSAINISSEURS DE HAUTE QUALITÉ

ACHETONS QUÉBÉCOIS



Produits approuvés par Santé Canada et Agriculture Canada

ATO POLY QUAT

Assainisseur et désodorisant



GARANTIE:

Alkyl (C14 50%, C12 40%, C16 10%) Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride	0.100%
Octyl decyl Dimethyl Ammonium Chloride	0.075%
Dioctyl Dimethyl Ammonium Chloride	0.030%
Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride	0.045%

Doux pour la peau : pH7, neutre.
Prêt à utiliser.
Odeur agréable.

Gallon 4 L



Bouteille 1 L avec vaporisateur

EVOLUTIONASE P

Nettoyant enzymatique pour unité ultrasonique, système d'évacuation et trempage des instruments



Nettoyant biodégradable

Odeur agréable : désodorisant à base d'agrumes.
Doux pour la peau : pH7, neutre.

Mode d'emploi : Pour unité ultrasonique et trempage des instruments, diluer 15 ml d'**EVOLUTIONASE-P** dans 1 litre d'eau.
Pour le nettoyage de système d'évacuation, utiliser 30 ml **EVOLUTIONASE P** par traitement (1 oz d' **EVOLUTIONASE P** par traitement) et faire aspirer la solution préparée par la canalisation rapide, la pompe à salive.
Cette solution s'utilise aussi pour le crachoir.

Bouteille 1 L avec compartiment gradué



Gallon 4 L

ANTI-MICROBE

Assainisseur moussant pour les mains

N'assèche pas la peau : sans alcool et sans rinçage.

Économique : nécessite entre 50 et 65% moins de volume de solution par application que les produits concurrents.

Efficace : détruit en 15 secondes : 99.9% *Clostridium difficile*, >99.9% *Staphylococcus aureus* (MRSA), >99.9% *Streptococcus faecalis* (VRE).

Sensation de propreté accrue : ne laisse aucun résidu collant sur la peau.

N'affecte pas les tissus et les surfaces (planchers, vêtements, cuir, etc.)

Ne détériore pas les vernis à ongles

Pompe de 50 ml (pour usage personnel)

Pompe de 550 ml (counter top)

Gallon 4 L

La pompe murale de 1.5 L fournit 2000 applications à chaque remplissage.



ACI QUAT II

Nettoyant et assainisseur pour système d'évacuation (2 en 1)
Nettoyant à base d'acide phosphorique (grade alimentaire) pour détartrage.
Assainisseur à base polyquaternaire (4^{ème} génération).



UN PRODUIT COMPLET : Nettoie le système. Détruit les microorganismes pathogènes et les films biologique. Laisse une odeur agréable de cerise.

N'endommagera pas la plomberie : nettoyant peu moussant.

Mode d'emploi : utiliser 30 ml **ACI QUAT II** par traitement (1 oz **ACI QUAT II** par traitement) et faire aspirer la solution préparée par la canalisation rapide, la pompe à salive. Cette solution s'utilise aussi pour le crachoir.

Bouteille 1 L avec compartiment gradué



Gallon 4 L

Produits Nettoyants de haute qualité BIO FLUX

Nettoyant de système d'évacuation
Action à 4 enzymes : Lipase, Protéase, Amylase et Cellulase pour biodégrader la matière organique complètement.



Nettoyant efficace à action prolongée : les enzymes continuent d'agir plus de 24 heures après l'application.

Odeur: désodorisant, odeur agréable.

N'endommagera pas la plomberie : nettoyant non moussant.

Doux pour la peau : pH7, neutre.

Mode d'emploi : utiliser 30 ml **BIO FLUX** par traitement (1 oz **BIO FLUX** par traitement) et faire aspirer la solution préparée par la canalisation rapide et la pompe à salive. Cette solution s'utilise aussi pour le crachoir.

Gallon 4 L



Bouteille 1 L avec compartiment gradué

PERLY MOUSSANT

SAVON À MAINS EN MOUSSE AVEC SURFACTANTS ANTI-BACTÉRIENS
pH 7 (Neutre). Très doux pour la peau et mousse riche.

Formats disponibles:

Pompe de 550 ml

Gallon 4 L

La pompe murale de 1.5 L fournit 2000 applications à chaque remplissage.



Pompe de 550 ml



Gallon 4 L

O PURE

NETTOYANT POUR CONDUITS D'EAU
Dissout les composés inorganiques et autres résidus et conserve vos conduits propres et désodorisés.



Gallon 4 L

DERMA

SAVON À MAINS AVEC SURFACTANTS ANTI-BACTÉRIENS
pH 7 (Neutre).

Très doux pour la peau et très moussant.



Gallon 4 L

atomes

3485 Ashby, Ville Saint Laurent
(Québec) Canada H4R 2K3 www.atomesbio.com
Tél.:(514) 745-2597 Cell.: (514) 242-4408

DISTRIBUTION PAR: